


Tectu Sil 391 Резьбовой клей

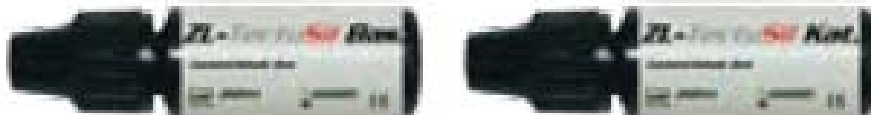

Химический состав:

Полидеметилполиметилгидрогенсилоксан,
винилметилполиметилсилоксан и силициумоксид.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Tectu Sil проложить равномерными линиями на стеклянной пластине или на блок для замешивания. Основательно смешать оба компонента. Длительность обработки замешанного материала составляет 5 минут. Tectu Sil наносится тонким слоем на резьбу. После ввинчивания и затвердения удалить остатки клея пинцетом или другим подходящим инструментом. В случае необходимости винты легко вывинчиваются. Остатки клея на резьбе Вы легко удалите паром или сжатым воздухом.

Условия хранения: См. на упаковке

ООО «РЕАЛДЕНТ»

г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.
Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54.

www.realdentcom.ru
info@realdentcom.ru