

DISCOLOURING BREAK

Растворитель гипса



Отличительные особенности:

- по сравнению с предыдущими средствами, эта жидкость намного эффективнее растворяет большое количество гипса за короткое время
- в то время, как остальные средства подобного рода оставляют белый осадок, данная жидкость растворяет гипс, не вызывая осадка и загрязнений, поэтому её можно неоднократно использовать в течение долгого времени
- зависимости от количества растворяемого гипса жидкость меняет цвет, поэтому в процессе работы вы легко можете судить о её дальнейшей способности растворения

- подходит для работы с любыми металлами и пластмассами,

применяющимися в стоматологии

- также эффективно растворяет средства для паковки (Кристобаллит), поэтому если опустить каркас в раствор, паковочная масса легко растворится
- также подходит для удаления альгината и гипса.

Способ применения:

1. Опустите в раствор (1/3) протез, снятый с гипсовой модели. После проведения первоначальной коррекции промойте водой, удалите излишки материала и влаги. Для удаления гипса в труднодоступных местах, таких как щели между зубами, нанесите на них Wax Pattern Cleaner и опустите в воду, тогда процесс очистки пойдёт быстрее.
2. В зимние времена при низкой температуре рекомендуется нагревать жидкость до 20 градусов. Чтобы ускорить процесс растворения гипса, рекомендуется использовать ультразвуковой очиститель или нагревать жидкость до 40 градусов.
3. По изменению цвета жидкости можно судить о способности дальнейшего растворения. Если жидкость становится лиловой или оранжевой, её ещё можно использовать; если жидкость становится светло-оранжевой или бесцветной, её способность растворения снижается. В этом случае рекомендуется воспользоваться новой жидкостью.
4. Если опустить в раствор слепочную ложку с остатками гипса, они размягчатся, и их можно легко удалить щёткой.

ООО «Денталдепо ЛОТ»

394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, дом 60.
Тел./факс 8 473 277-64-77; 271-49-54.

info@dentald.ru
www.dentald.ru

5. После удаления гипса хорошо промойте протез, слепочную ложку, штифты (довелпины) водой.
6. После использования жидкости храните её в закрытом виде, в прохладном тёмном месте, таким образом её можно будет неоднократно использовать в течение долгого времени.
7. Возможно возникновение осадка, однако он не повлияет на качество продукта.

Меры предосторожности

1. Данный продукт нельзя употреблять внутрь и рекомендуется хранить подальше от детей.
2. Не используйте продукт в целях, не указанных в инструкции.
3. В случае попадания жидкости на кожу, промойте поражённое место водой.
4. В случае попадания жидкости внутрь вызовите рвотный процесс. В случае попадания жидкости в глаза промойте их водой. По необходимости обратитесь к врачу.
5. Рекомендуется хранить данный продукт в тёмном прохладном месте, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

Объём: 1000 мл.

Производитель: Yamahachi Dental MFG.,CO., Japan