


# РАМКА ДЛЯ РАЗБОРНОЙ МОДЕЛИ

## Запирающая рамка

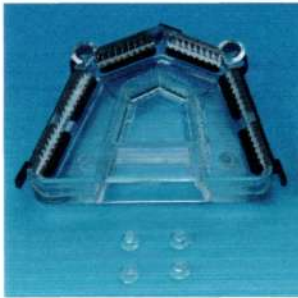


Артикул: 04177

## Формирователь цоколя




Артикул: 02060-5

## Установочная пластина

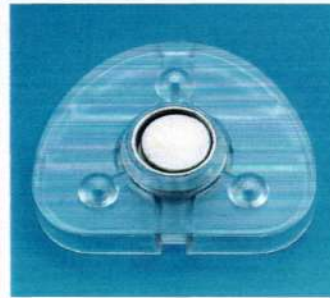

Артикул: 02071


## Установочная шайба

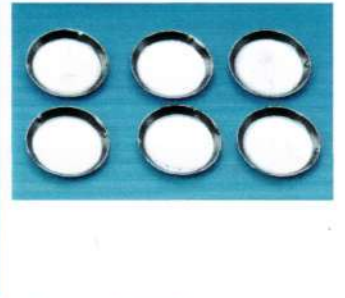

Артикул: 02085

### Характеристики

Запирающая рамка для разборных моделей специально разработана для упрощения работ с гипсовыми моделями. Нет необходимости в использовании металлических штифтов. При проектировании имплантатов не требуется сверление гипсовой модели, таким образом снижается риск повреждения модели. Также рамка может использоваться совместно с трёхмерными артикуляторами Labo Mate-150 и Labo Mate-200.

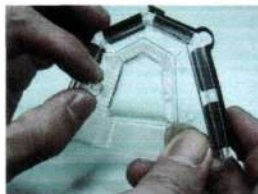

Установите ретенционные пины в рамку




Приклейте их




Запирающая рамка готова к применению



Залейте гипс в углубление рамки

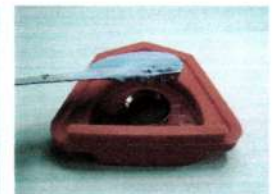

Установите пластину с магнитом в формирователь цоколя и залейте гипсом

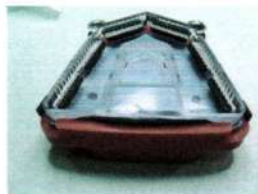

Поместите рамку в формирователь цоколя



Залейте цокольный гипс в рамку



Поместите модель в цокольный гипс



После затвердевания извлеките модель



Распилите модель



Установите рамку с моделью в артикулятор



Вы можете поднять или опустить установочную пластину, поворачивая рукоятку



Используя инструмент для удаления магнита, удалите магнит из пластины



Установите верхнюю рамку параллельно нижней



Выставьте, какую нужно Вам высоту и держите заднюю часть верхней рамки левой рукой



Отрегулируйте расстояние между моделями верхней и нижней челюстей



Сильно зафиксируйте переднюю ручку



Поместите обратно магнит в установочную пластину



Пример установленных моделей



Вы можете использовать рамку много раз