

Lunar Universal


Stain & Glaze

BASIC KIT

 MEDIFIVE

LUNAR Universal Stain & Glaze

BASIC Kit Quick Guide

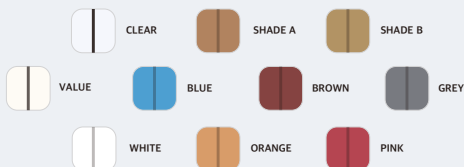

С о с т а в

· 2 вида глазурной пасты: Value, Clear

Value: регулировка яркости

Clear: прозрачная глазурь

· 2 вида пасты Shade Stain: Shade A, Shade B

Shade A: регулировка цвета оттенка A

Shade B: регулировка цвета оттенка B

· 6 видов пасты Stain: White, Orange, Brown, Grey, Blue, Pink

White: характеристика как белая полоса, светоотражающая / сочетание с

другими пятнами Orange: характеристика как дентин, окклюзионная / сочетание с другими пятнами и оттенками Brown: характеристика как глубокая бороздка, ямка, пятна и т. д.

Grey: характеристика как полупрозрачный слой, сочетание с синим пятном

Blue: характеристика как полупрозрачный слой, сочетание с серым пятном

характеристика как десневая область, сочетание с розовым пятном

Pink: характеристика как десневая область, сочетание с белыми, синими пятнами


· CERA Mix: регулировка вязкости для морилки, глазурной пасты.



Firing Parameter

	Dry Time min	Start Temp. ℃	Vac. on ℃	Heat Rate ℃ / min	Vac. Off ℃	High Temp. ℃	Hold time min
Zirconia (Implant case)	7	403	403	40	769	770	2
Zirconia (Normal case)	5	403	403	50	749	750	1
Lithium Disilicate	5	403	403	50	749	750	1
Layering Ceramic	5	403	403	50	749	750	1
Metal Ceramic	5	403	403	50	799	800	1

For long-span Zirconia Bridges, Increase the firing high temperature more 10~20℃

Application

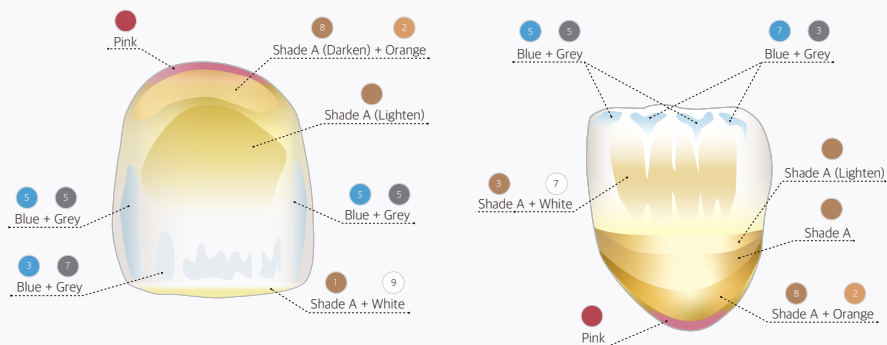

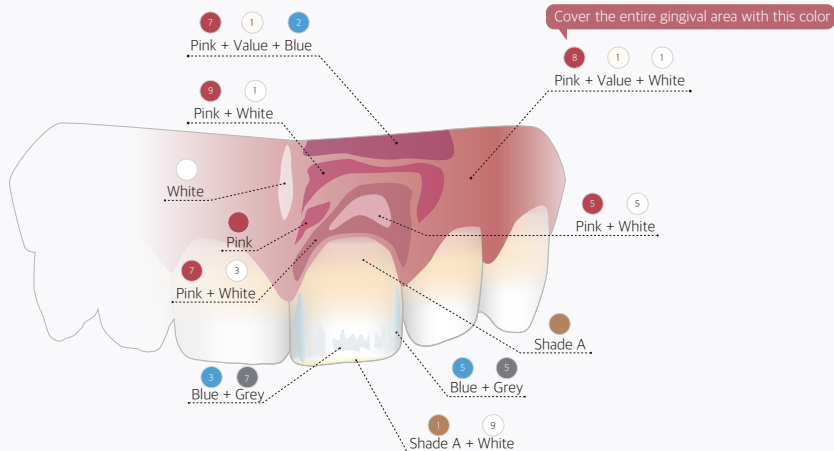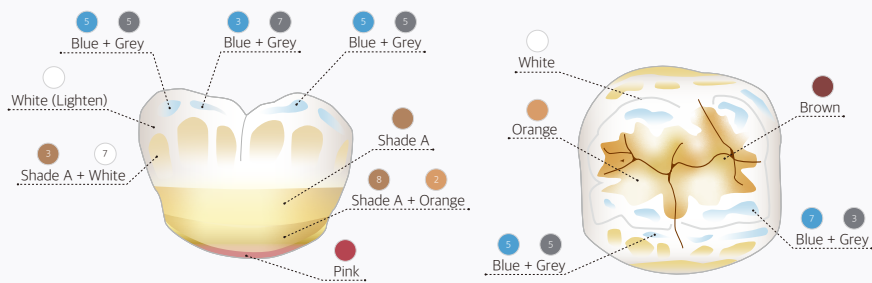

Precaution

- Не удаляйте излишки жидкости из контейнера Jar.
- Тщательно перемешайте морилку и глазурь перед использованием
- Не смешивайте воду.