

Инструкция по применению

Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit» по ТУ 32.99-048-10614163-2020

РУ № РЗН 2020/10326 от 14.05.2020


Назначение

Маска-экран предназначена для эффективной защиты лица, глаз органов дыхания медицинского персонала от прямого попадания мелких частиц пыли, аэрозолей, брызг биологических жидкостей, в условиях медицинского учреждения при выполнении клинических или лабораторных процедур, а также стоматологических и косметологических работ. Выпускается в нестерильной форме.

Способ применения

Снимите защитную плёнку с обеих сторон щитка и налобной ленты. Выберите необходимые отверстия на щитке и налобной ленте (рис. 1). Проденьте тканевую резинку через отверстия и потяните, чтобы отрегулировать расстояние (рис. 2). Повторите действие с другой стороны.

Для дополнительной надёжности зафиксируйте концы тканевой резинки с помощью узлов.

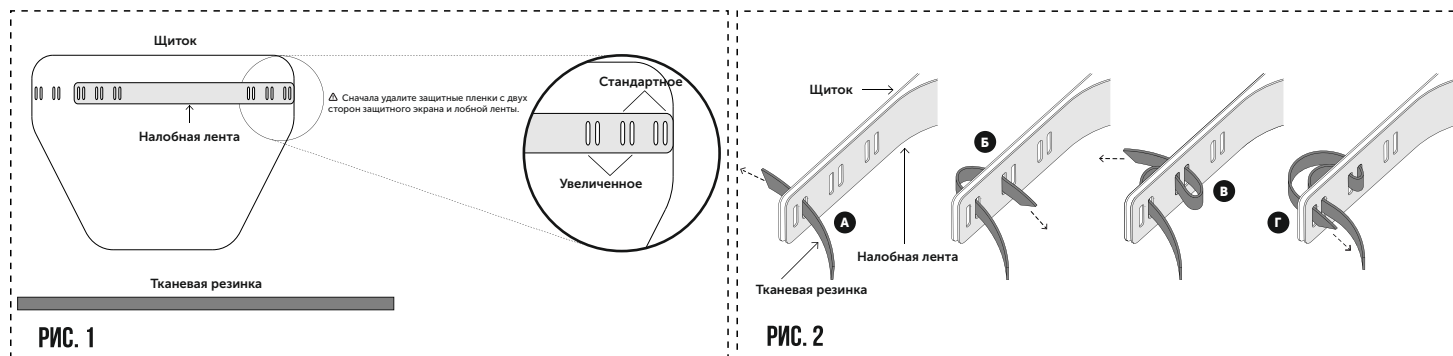

Условия эксплуатации

Эксплуатировать при температуре воздуха от +10° до +45° С и относительной влажности не более 98%.

Методы очистки и дезинфекции

После каждого использования необходимо проводить дезинфекцию маски-экрана. Дезинфекцию проводят путём полного погружения маски-экрана в разобранном виде в дезинфицирующий раствор (перекись водорода концентрацией 3%), время выдержки 80 мин., после обработки промыть проточной водой.

Комплект поставки

Налобная лента - 1 шт.; Щиток - 1 шт.; Инструкция по применению - 1 шт.; Тканевая резинка – 1 шт.

Масса и габаритные размеры

Масса: Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit» в сборе - 35±5 г.

Габаритные размеры: Налобная лента - длина 260±5 мм, ширина 25±1 мм., Щиток - высота 230±5 мм, длина большего основания 310±5 мм, длина меньшего основания 160±5мм, толщина щитка 0,35±0,15 мм.

Условия транспортирования и хранения

Транспортировать при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98%.

Хранить в упакованном виде в помещении, защищенном от атмосферных осадков и прямого солнечного света при температуре от +5° до +40°С и относительной влажности не более 80%.

Гарантия изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие маски-экрана всем требованиям настоящих Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, в течение 5 лет.

Гарантийный срок хранения 5 лет с даты выпуска.

Номер партии и дата выпуска указаны на обратной стороне инструкции.

Техническое обслуживание и ремонт

Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit» техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Утилизация отходов

Отходы при использовании изделия в виде пленки и упаковки утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.27.90-10 класса Б.

