

### Инструкция по очистке для D001-1 и D00-1-atc

1. Извлеките лоток из органайзера, осторожно нажав на язычок в верхней части лотка.
2. Снимите прозрачную крышку, удалив кнопки по бокам органайзера.
3. Выдвините до конца выдвижной ящик.
4. Протрите каждую деталь тканью, смоченной дезинфицирующей жидкостью.
5. Верните снятые детали на место в обратном порядке.
6. Обязательно закрепите лоток под язычком на верхней части органайзера
7. Закройте защитную крышку для предотвращения повторного загрязнения

### Инструкция по стерилизации **ТОЛЬКО** для D001-1-atc

1. Извлеките лоток из органайзера, осторожно нажав на язычок в верхней части лотка.
2. Поместите **ТОЛЬКО СЕРЫЙ ЛОТОК** в автоклав вместе с борами.
3. Запустите автоклав в заданные циклы (134°C в течение 5 минут или 121°C в течение 20 минут).
4. Обязательно закрепите лоток под язычком на верхней части органайзера
5. Закройте защитную крышку для предотвращения перекрестного загрязнения

## Panoramic Burr Organizer



**Панорамный стенд для боров  
Доступен в двух моделях:**

**D001-1-atc, D001-1**



- Легкий доступ к каждому отдельному бору
- Маркированные отделы для боров
- Съёмный лоток пригодный для стерилизации в автоклаве (Только D001-1-atc)


- Регулируемый выдвижной ящик
- Вентилируемые гнезда для боров
- Съёмная защитная крышка
- Не скользящие резиновые ножки

### Удобный доступ

Панорамная форма и шахматная конфигурация гнезд, позволяют получить четкий вид и легкий доступ к каждому бору.

### Устранение перекрестного загрязнения

Поддон для боров подходит для стерилизации в автоклаве (только D001-1-atc). Это, в сочетании с прозрачной крышкой, помогает предотвратить перекрестное загрязнение и защищает боры.

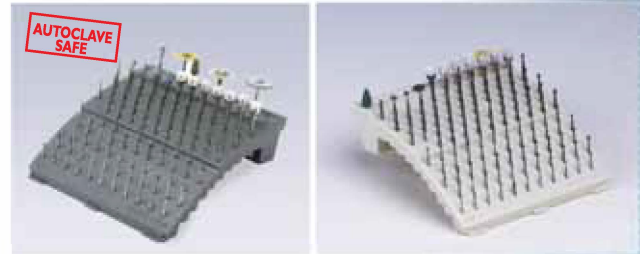

### Маркированная рабочая станция

Лоток разделен на области, обозначенные для разных типов боров. Кроме того, органайзер включает в себя удобный выдвижной ящик с регулировочными отсеками для клиньев, полировальных дисков, матриц и т.д.

### Вентилируемые валы

Запатентованная подставка с открытой конструкцией позволяет ускорить время высыхания и предотвращает коррозию благодаря системе вентиляции и дренажа.

### Простота обслуживания

Организатор легко разбирается. Части можно очищать отдельно.

