

Инструкция по применению

Паста полировальная стоматологическая с алмазным наполнителем для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из керамических материалов «Polir Diamant-soft» ТУ 9391-036-10614163-2003

ПУ № ФСР 2008/01641 от 24.08.2021 г

Назначение

Паста полировальная стоматологическая «Polir Diamant-soft» с алмазным наполнителем предназначена для зеркальной полировки поверхностей зубных протезов из керамических материалов в условиях медицинского учреждения при выполнении стоматологических работ.

Состав и основные свойства

Паста полировальная стоматологическая «Polir Diamant-soft» является изделием медицинского назначения, выпускается в нестерильной форме. «Polir Diamant-soft» представляет собой пластичную, однородную пасту серого цвета, состоящую из тонкого алмазного абразивного материала с помощью которого осуществляется полировка поверхности до зеркального блеска и полимерных водорастворимых добавок, предотвращающих разбрызгивание пасты.

Способ применения

Закрепите войлочный диск для полировки при помощи винта в дискодержатель, вставьте дискодержатель в зуботехнический наконечник бормашины. Нанесите пасту равномерным слоем на всю рабочую поверхность войлочного диска, полировку проводите со скоростью не более 7000 об/мин. при равномерной силе нажима на полирующую поверхность. Протрите поверхность чистой салфеткой или промойте проточной водой. При необходимости, проведите полировку повторно.

Меры предосторожности

При работе с пастой персонал должен использовать защитный экран для глаз, перчатки для защиты рук.

Форма выпуска

Паста массой (10±1) г в шприце.

Условия транспортирования и хранения

Пасту в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98 %. Паста в упаковке завода-изготовителя должна храниться на складах изготовителя и потребителя, исключающих попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 98 %.

Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие пасты в течение срока годности всем требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. Срок годности 5 лет с даты выпуска.

Партия, дата выпуска, срок годности указаны на упаковке.

Техническое обслуживание и ремонт

Паста техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

Утилизация отходов

Остатки и упаковку пасты утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

